

DICHLOREXAN® PAD 2%

Toallita con Clorhexidina 2%
y Alcohol Isopropílico 70%.
Desinfectante de Dispositivos Médicos



DESCRIPCIÓN

Dichlorexan® PAD 2% está específicamente diseñado para la desinfección de dispositivos médicos, como puertos y conexiones de catéteres, instrumentos sin agujas, cánulas y tapones de botellas de cultivo de sangre. Este producto fue creado para proporcionar una desinfección eficaz bajo las normativas de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS). Contiene una solución de gluconato de clorhexidina al 2% en un 70% de alcohol isopropílico, lo cual permite un efecto biocida y bactericida mucho mayor respecto a la clorhexidina por sí sola, ya que no se ve significativamente inactivada por presencia de materia orgánica. Previene la contaminación bacteriana intraluminal durante diferentes procedimientos. Dentro de sus ventajas permite la desinfección de otros dispositivos médicos como: termómetros, manguitos, fonendoscopios, etc. Su formato monodosis es más higiénico, evita contaminaciones cruzadas, ya que permite su uso individual.

→ FÓRMULA

Alcohol Isopropílico, Clorhexidina Gluconato, Agua Desmineralizada.

→ INDICACIÓN

Dichlorexan® PAD 2% está específicamente diseñado para la desinfección de dispositivos médicos, como puertos y conexiones de catéteres, instrumentos sin agujas, cánulas y tapones de botellas de cultivo de sangre.

→ INSTRUCCIONES DE USO

Retire la toallita del envase y aplique **Dichlorexan® PAD**, directamente en la superficie a desinfectar, espere 30 segundos antes de manipular nuevamente la superficie desinfectada.

DICHLOREXAN® PAD 2%

Toallita con Clorhexidina 2% y Alcohol Isopropílico 70%

→ SEGURIDAD DE USO

Respetar siempre las instrucciones de limpieza y desinfección del fabricante de los equipos médicos.

→ CONTRAINDICACIONES

Dispositivos incompatibles a compuestos alcohólicos y /o Clorhexidina.

→ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Líquidos y vapores extremadamente inflamables. Almacenar en un lugar fresco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Provoca irritación ocular grave. Respetar siempre las instrucciones de limpieza y desinfección del fabricante de los equipos médicos. Desechar en forma aséptica.

En caso de Inhalación y/o contacto con la piel: acuda al médico inmediatamente y muéstrela una copia de la etiqueta. **En caso de contacto con los ojos:** Aclarar cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si lleva y seguir aclarando. Acuda al médico inmediatamente y muéstrela una copia de la etiqueta.

→ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición	Toalla con Clorhexidina 2% y alcohol isopropílico 70%
Color	Blanco
Dimensiones extendidas	6,5 x 5,6 cm

→ PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentación	Código Producto Terminado (PT)	Unidad de Venta
Dichlorexan® PAD 2%	2401636	100 unidades por caja