

3M

Cavilon™

Soluciones para
el Cuidado de la Piel



3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera

Crema hidratante concentrada que brinda protección de larga duración contra los fluidos corporales y acondiciona la piel.

Formulada con la tecnología de polímeros de 3M, la crema es concentrada, libre de fragancia, resistente a los lavados y permite la adhesión de cintas y apósitos. Proporciona adicionalmente una barrera que protege la piel de la humedad y agentes irritantes.

Usos clínicos:

- ✓ Disminución de riesgo de lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH), tales como Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI), Dermatitis Irritativa del Pañal (DIP) con deposiciones formadas, pastosas u orina.
- ✓ Como parte de un programa integral de cuidado de la piel, disminuye la incidencia y gravedad de la DAI y la incidencia de lesiones por presión.
- ✓ Acondiona, suaviza y repone la capa lipídica de la piel

Frecuencia de uso recomendada:

Uso	Frecuencia de aplicación
Hidratación	Una vez cada 24 horas
Disminución de riesgo de DAI o DIP	Cada tres lavados

* Recomendamos el uso en piel indemne o levemente enrojecida

* Siga los protocolos de su institución

Características del producto:

- ✓ Brinda hidratación profunda. Repone la capa hidrolipídica, reacondiona y suaviza la piel
- ✓ Protege la piel de la humedad y agentes irritantes como orina y deposiciones formadas
- ✓ Resiste 3 lavados y elimina la necesidad de aplicación en cada aseo genital
- ✓ Una vez aplicada se torna transparente, lo que permite visualizar la piel
- ✓ No requiere ser removida
- ✓ Permite la adhesión de cintas y apósitos
- ✓ No interfiere con la capacidad de absorción de apósitos o pañales
- ✓ Compatible con gluconato de clorhexidina
- ✓ pH balanceado
- ✓ Componentes principales: terpolímero de acrilato y dimeticona 1.3%

Instrucciones de aplicación:



1. Limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH ácido o neutro, según el protocolo institucional
2. Seque la piel sin friccionar
3. Aplique un círculo de 2 a 2.5 cm de crema para proteger la piel de la zona sacra y genital del adulto y/o para hidratar la piel. Evite aplicar en exceso para que no quede blanca, oleosa o brillante*
4. Esparza en la piel hasta que se absorba completamente
5. Reaplique según la frecuencia de uso recomendada**

* La piel debe estar libre de protectores cutáneos u otras cremas, aceites, ungüentos o pastas antes de la aplicación de 3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera

** Sobre 3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera no se recomienda aplicar protectores cutáneos u otras cremas, aceites, ungüentos o pastas.

Información de pedido:

Cat No	Descripción	Empaque
3392G	3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera Tubo de 92 g	12 unidades/caja



División de Soluciones para el Cuidado Crítico y Crónico

3M Cuidado de la Salud
2510 Conway Avenue
St Paul, MN 55144 USA
1-800-228-3957
3M.com/Cavilon

3M y Cavilon son marcas comerciales de 3M.

Por favor recicle. © 3M, 2021. Todos los derechos reservados.
70-2021-7103-3