

**3M**

**Cavilon™**

Soluciones para  
el Cuidado de la Piel

# 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor

Película protectora que forma una barrera contra adhesivos, humedad, fricción y cizallamiento.

Al disminuir la fricción (componente del cizallamiento), la película ayuda a reducir el riesgo de Lesiones o Úlceras por Presión (LPP o UPP).



## Usos clínicos

### Disminución de riesgo de lesiones cutáneas:

- ✓ Asociadas a la humedad (LESCAH): periestomales, perilesionales, alrededor de tubos o drenajes, intertrigo, Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI)
- ✓ Por adhesivos de uso sanitario (MARSI)
- ✓ Por fricción o cizallamiento; ayuda a disminuir el riesgo de lesiones por presión
- ✓ Por uso de elementos de protección personal (EPR- EPP)

### Frecuencia de uso recomendada

Uso	Frecuencia de aplicación
Disminución de riesgo por lesiones de piel asociadas a la humedad (LESCAH) en pacientes de riesgo moderado	Cada 24 a 72 horas dependiendo de la frecuencia y tipo de agente irritante
Disminución de riesgo de lesiones por adhesivos	Antes de aplicar el producto adhesivo
Disminución de riesgo de lesiones por fricción o roce	Cada 72 horas



## Características del producto

- ✓ Forma una capa protectora respirable y flexible, que permite visualizar la piel gracias a su tecnología de polímeros que contiene un plastificante
- ✓ Permite la adhesión de apósitos y cintas, y protege la piel del daño por adhesivos de uso sanitario (MARSI)
- ✓ Protege la piel de la humedad y agentes irritantes como orina, deposiciones líquidas, saliva, sudor y exudado de heridas
- ✓ Disminuye el riesgo de daño por fricción o cizallamiento, ayudando a disminuir el riesgo de lesiones por presión (LPP)
- ✓ Puede ser aplicada sobre piel sin pérdida de continuidad
- ✓ Costo-efectiva: resiste hasta por 72 horas y no necesita ser removida
- ✓ Libre de fragancia y látex, no produce ardor, no es tóxica ni interfiere con el proceso de cicatrización
- ✓ Se seca en aproximadamente 30 segundos
- ✓ No interfiere con la capacidad de absorción de apósitos o pañales
- ✓ Compatible con gluconato de clorhexidina
- ✓ Compuesto por: Hexamethyldisiloxane, Isooctane, Acrylate Terpolymer y Polyphenylmethylsiloxane



División de Soluciones para el Cuidado Crítico y Crónico

3M Cuidado de la Salud  
2510 Conway Avenue  
St Paul, MN 55144 USA  
1-800-228-3957  
3M.com/Cavilon

## Instrucciones de aplicación

### Disminución de riesgo de lesiones por humedad

1. Si es necesario, limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH ácido o neutro, según protocolo institucional, y seque la piel sin friccionar
2. Aplique un puff de 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor en spray en las zonas a proteger, de manera uniforme, a 10 o 12 cm de distancia de la piel
3. Deje secar por 20 a 30 segundos
4. Para mayor protección de la piel, aplique un segundo puff en las mismas zonas (no aplique más de dos capas)
5. Al aplicar el producto sobre pliegues cutáneos, sostenga la piel hasta que el producto se seque completamente

### Disminución de riesgo de daño por adhesivo

#### Protección de piel alrededor de un catéter vascular

1. Realice la curación del sitio de inserción del catéter de acuerdo con los protocolos de su institución y deje secar completamente el producto antiséptico
2. Aplique el hisopo estéril de 1 ml.
3. Deje secar por 30 segundos

\* Si está utilizando el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ CHG para el aseguramiento del sitio I.V. con Gluconato de Clorhexidina, sugerimos dejar libre de película protectora la zona donde quedará la almohadilla de clorhexidina.

4. Coloque el apósito correspondiente

#### Protección de la piel alrededor de una herida

1. Realice la curación y limpie la piel a proteger. Deje secar
2. Aplique el producto y deje secar por 30 segundos
3. Cubra la herida según el protocolo de su institución

#### Protección al usar EPR - EPP

1. Aplique presentación en hisopo o toallita, sobre la piel limpia y seca, en la frente, mejillas y tabique nasal. Evite la zona alrededor de los ojos
2. Deje secar completamente (90 segundos)
3. Instale su EPR y efectúe pruebas de sello
4. Vuelva a aplicar cada 72 horas o según necesidad



La piel debe estar libre de protectores cutáneos u otras cremas, aceites, ungüentos o pastas antes de la aplicación del producto. Sobre el producto no se recomienda aplicar protectores cutáneos u otras cremas, aceites, ungüentos o pastas.

## Información de pedido

Código	Descripción	Empaque
3343E	3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor Hisopo de 1 ml	25 unidades /cajita 4 cajitas /caja
3346E	3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor Spray de 28 ml	12 unidades /caja

3M, Cavilon y Tegaderm son marcas comerciales de 3M.  
Por favor recicle. © 3M, 2021. Todos los derechos reservados. 70-2021-7104-1