



Tegaderm™ Alginato

Apósito de Alginato de Alta Integridad

¿Qué es?

3M™ Tegaderm™ Alginato Apósito de Alginato de Alta Integridad, es un apósito estéril, hecho de fibras no tejidas de ácido algínico, alginato de calcio y alginato de sodio.

El apósito es altamente conformable, suave, absorbente y estéril, diseñado para ser usado como apósito primario en heridas crónicas o agudas. Este apósito reacciona con el exudado de la herida para formar una masa gelatinosa, que proporciona un ambiente de curación húmedo.

Tegaderm™ Alginato está diseñado para su uso en heridas de espesor parcial y total, con exudado moderado a abundante. Se pueden usar en lesiones por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas, úlceras diabéticas, heridas superficiales como cortes y abrasiones, zonas dadoras, heridas postoperatorias, heridas traumáticas y otras lesiones dérmicas. También ayuda a controlar el sangramiento menor y apoyar el desbridamiento autolítico.

Está compuesto de alginato de grado farmacéutico, altamente gelificante, que absorbe hasta 20 veces su peso y se retira suavemente de las heridas cuando está en forma de gel o al irrigar, disminuyendo el riesgo de daño del tejido durante los cambios de apósitos.

El uso de cualquier apósito, incluidos los alginatos, debe ser parte de un protocolo bien definido para el manejo de las heridas.

Este producto no está diseñado, vendido o destinado a su uso, excepto como se indica.

3M™ Tegaderm™ Alginato es producido sin materiales que contengan látex de caucho natural.

¿Qué hace?

Estos apósitos absorben hasta 20 veces su peso en exudado de la herida, para formar una masa gelatinosa, que proporciona un ambiente de curación húmedo.

También ayuda a controlar el sangramiento menor y apoyar el desbridamiento autolítico.

¿Cuándo se utiliza?

3M™ Tegaderm™ Alginato, se utiliza como apósito primario en heridas con exudado moderado a abundante como lesiones por presión, úlceras venosas, úlceras diabéticas, heridas superficiales como cortes y abrasiones, zonas dadoras, heridas postoperatorias, heridas traumáticas y otras lesiones dérmicas.

También pueden ayudar a controlar el sangramiento menor y apoyar el desbridamiento autolítico.



¿Cómo se utiliza?

Preparación

- 1 Si es necesario, desbride la herida de acuerdo con el protocolo estándar.
- 2 Limpie e irrigue el lecho de la herida.
- 3 Limpie la piel circundante y séquela bien.
- 4 Se recomienda el recorte del exceso de vello para la comodidad del paciente.
- 5 Si la piel del paciente es frágil o se espera que el exudado vaya más allá del borde de la herida, se puede aplicar una barrera cutánea como 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor.

Aplicación del apósito

- 1 Seleccione el tamaño del apósito apropiado para el tamaño de la herida. Los apósitos de 3M™ Tegaderm™ Alginato se pueden recortar para que se ajusten al sitio de la herida.
- 2 Aplique un apósito en el lecho de la herida, sin que éste se superponga sobre la piel circundante.
- 3 Empaque libremente en heridas profundas.
- 4 Cubra con un apósito secundario adecuado.

Durante el uso:

Observe el sitio de la herida para asegurarse de que el apósito secundario esté intacto y no haya fugas. Controle los signos de infección. Si se produce una infección (que puede ser señalada por fiebre, aumento del dolor, eritema, induración o un olor o secreción inusual), implemente el tratamiento médico adecuado. Los apósitos Tegaderm™ Alginato de se pueden usar en heridas infectadas solo bajo el cuidado de un profesional de la salud.

Los apósitos de alginato normalmente se cambian entre 1-3 días; sin embargo, el apósito puede permanecer en la herida por hasta 7 días, dependiendo de la evaluación de un profesional de salud.



Cambio de apósito

Retire el apósito secundario y restos de apósito de alginato no gelificado.

Irrigue el gel restante suavemente.

Si el apósito parece seco, sature con solución salina estéril para ayudar a su eliminación.

El apósito se puede quitar con pinzas/guantes estériles o irrigación suave.

Precauciones

3M™ Tegaderm™ Alginato, no está indicado para implantes quirúrgicos o para su uso en quemaduras de espesor total.

Los apósitos 3M™ Tegaderm™ Alginato no deben usarse en heridas con bajo o nulo exudado; ya que podrían provocar la adherencia del apósito al lecho de la herida. Si esto ocurriese, se recomienda irrigar con solución estéril.

Envasado

Cada envase unitario de 3M™ Tegaderm™ Alginato incluye:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Códigos EAN
- Método de esterilización
- Guía simple de uso y regla

Método de esterilización

Esterilización mediante rayos gamma

Conservación

Para un mejor desempeño, consérvese en un ambiente seco a temperatura ambiente menor a 25°C.

Le recomendamos vea la fecha de caducidad del producto impresa en el envase.

Vida útil 5 años



Información para pedidos:

Número de Catálogo	Tamaño	Apósitos por caja
90112	10cm x 10cm	10
90120	30,4cm	5



3M Cono Sur

División de Soluciones Médicas

3M Chile

Santa Isabel 1001

7501412 - Providencia - Santiago

Tel.: 600 300 3636

go.3m.com/3msalud-chile

Nota: Existen indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad específicas para estos productos y terapias. Consulte un profesional de la salud y las instrucciones de uso del producto, antes de la aplicación.

© 2022 3M. Todos los derechos reservados. 3M y las otras marcas mencionadas son marcas y/o registradas. Prohibido el uso no autorizado.