

ALLY® Adhesive Remover

Ficha Técnica



Información Administrativa

Fabricante:	Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50, Karlstad, Sweden
Fabricante Legal	B. Braun Medical AG, Schwarzenberg Weg 73-79, 34212 Mesulgen, Alemania.
Importación y Distribución:	B. Braun Medical Spa Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Descripción, composición y propiedades del dispositivo

Principio Activo	Removedor Adhesivo a base de silicona, no contiene alcohol, transparente, sin contenido de aceites de 50ml en formato aerosol para remover restos de adhesivos de una manera rápida e indolora.
Nombre Comercial	Ally Adhesive Remover 50ml
Código B Braun	2005-1
Descripción	<p>Ally Adhesive Remover es de rápida acción entre lo que se quiere desprender o liberar y la piel, liberando suavemente el dispositivo en cuestión de segundos desde la aplicación. No deja residuos después de la aplicación.</p> <p>Tiene integrado sistema de cierre que orienta la apertura de la tapa y facilita la pulverización. Su fórmula es inolora, incolora sin aditivos irritantes.</p>
Ventajas	<p>No irritante, no contiene alcohol Adecuado para uso diario</p>
Composición del dispositivo	<p>Hexametildisiloxano (75% w / w) Butano 40 (25% w / w) (Butano actúa como el propulsor del aerosol de la bomba)</p>

Indicaciones

Modo de Uso	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione visualmente el empaque de Ally Adhesive Remover para comprobar si tiene daños antes de la apertura.2. La piel debe estar limpia y seca antes de la aplicación.3. Mantenga la boquilla del aerosol alejada de la piel entre 10 a 15 cm, y aplique de forma uniforme sobre toda la zona a despegar, al tiempo que mueve el aerosol con un movimiento de barrido.4. Si se pasa una zona por alto, vuelve a aplicarla en esa zona para asegurar el desprendimiento.5. No deja residuos por lo que no es imprescindible la limpieza post uso.
-------------	---

Indicaciones	Ally Adhesive Remover está indicado en la eliminación rápida e indolora de insumos médicos que se encuentren adheridos a la piel, especialmente en la remoción de placas en las estomas, o de apósitos en las heridas cuando se encuentran muy adheridas.
--------------	---

Precauciones de Uso	Si se detectan signos de una reacción alérgica, suspenda el uso del producto y busque consejo de un profesional de la salud sobre el siguiente curso de acción. Solo de uso externo. No exponer el removedor al sol o altas temperaturas mayores de 50°C. No pulverizar sobre una llama o un cuerpo incandescente. Evitar la inhalación directa. No usar si el recipiente se encuentra dañado
---------------------	--

Contraindicaciones	El producto no debe utilizarse en personas sensibles o alérgicas a sus componentes. No usar en caso de vencimiento. No pulverizar en los ojos.
--------------------	--

IFU: si/no	Si
------------	----

Método Esterilización

Médico estéril: Sí/No	NO
Método de esterilización	NO

Condiciones de conservación y almacenamiento.

Condiciones de almacenaje	Conservar en un lugar fresco y seco por debajo de 25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.
Condiciones de transporte	Transportar alejado de la luz solar directa
Duración	36 meses desde la fabricación

Seguridad en Uso

Inflamable:	No aplica
Libre de Latex:	Si
Libre de DEHP:	Si
Libre Alcohol:	Si
Compatible con Gluconato de Clorhexidina:	Si

Embalaje y referencias

Código Bbraun

Descripción

Medida

Caja de Empaque

2005-1

Ally Adhesive Remover

50ml

Caja x 24 unidades



B. Braun Medical Spa | Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana | Chile
Tel. 2 2440 7100 | www.bbraun.cl |