

ASKINA® Barrier Film Spray 28ml

Ficha Técnica



Información Administrativa

Fabricante:	Avery Dennison Medical Ltd. IDA Business Park, Ballinalee Road, Longford, N39 DX73, Ireland.
Fabricante Legal	B. Braun Medical AG, Schwarzenberg Weg 73-79, 34212 Mesulgen, Alemania.
Importación y Distribución:	B. Braun Medical Spa Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Descripción, composición y propiedades del dispositivo

Principio Activo	Apósito líquido de solución polimérica de disiloxano y copolímero acrílico que crea una película protectora uniforme de secado rápido, incoloro, permeable al oxígeno y vapor en un frasco aerosol de 28ml.
Nombre Comercial	Askina® Barrier Film Spray 28ml
Código B Braun	5036
Descripción	Askina® Barrier Film Spray es una solución polimérica que crea una película uniforme cuando se aplica en la piel. El producto se dispersa en un solvente no irritante que se seca con rapidez. La película es incolora, transparente, y posee una buena permeabilidad al oxígeno y vapor de agua. La película de barrera ayuda a proteger la piel intacta o dañada contra la humedad y/o irritación causada por la incontinencia urinaria y/o fecal, los jugos digestivos y el drenaje de heridas.
Composición del dispositivo	Disiloxano Copolimero Acrílico Solvente no Irritante a base de silicona
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">▪ Protección duradera de hasta 72h.▪ No produce dolor ni irritación (no contiene alcohol).▪ Aplicable en piel intacta o dañada.▪ No se absorbe.▪ Transparente.▪ Permeable al oxígeno y vapor húmedo.▪ Hipoalérgico.▪ No citotóxico.

Indicaciones

Modo de Uso



1. Inspeccione visualmente la botella de Askina® Barrier Film Spray 28ml para comprobar si tiene daños antes de la apertura.
2. La piel debe estar limpia y seca antes de la aplicación de la película de barrera.
3. Mantenga la boquilla del aerosol alejada de la piel entre 10 a 15 cm y aplique una capa suave y uniforme sobre toda la zona de tratamiento, al tiempo que mueve el aerosol con un movimiento de barrido.
4. Si se pasa una zona por alto, vuelve a aplicarla en esa zona solo después que se haga secado la primera aplicación (aproximado 30seg después)
5. Si se aplica la película protectora a una zona con pliegues cutáneos u otras zonas de contacto de piel con piel, asegúrese de que estas áreas estén separadas para que puedan secarse en su totalidad antes de volver a su posición normal.
6. Cuando se aplique bajo cintas adhesivas, apósitos o dispositivos:
7. Deje que la película protectora seque por completo antes de cubrirla con apósitos u adhesivos.
8. Es necesario volver aplicar la película de barrera cada vez que se cambien los apósitos y/o productos adherentes.
9. Cuando se aplique como protección contra fluidos: se recomienda volver a aplicar la película de barrera cada 24-72horas según la frecuencia de limpieza. En casos extremos (como deposiciones diarreicas) de limpieza frecuente, pueden ser necesarias aplicaciones más frecuentes; cada 12-24horas.
10. Se puede retirar mediante el uso de removedores de adhesivos médicos. Limpie y seque la zona en cuestión y vuelva aplicar la película de barrera.
11. Vuelva a colocar la tapa sobre la boquilla del aerosol cuando no se encuentre en uso.

Indicaciones

Askina® Barrier Film Spray 28ml está indicado en:

- Cuidado de la piel por incontinencia.
- Protección de piel periestomal
- Protección de la piel que rodea las heridas
- Protección de la piel de humedad por dispositivos adherentes y/o dispositivos médicos.
- Puede emplearse en adultos, niños y lactantes de más de 12 semanas de vida.

Precauciones de Uso

Si se detectan signos de una reacción alérgica, suspenda el uso del producto y busque consejo de un profesional de la salud sobre el siguiente curso de acción.

Solo de uso externo.

El uso de otros productos de barrera como pomadas, cremas o lociones puede reducir significativamente la eficacia de la película de barrera.

Contraindicaciones

El producto no debe utilizarse en personas sensibles o alérgicas a sus componentes.

No usar en caso de vencimiento.

IFU: si/no

Si

Proceso de esterilización

Médico estéril: Si/No Si, hasta su primer uso.

Método de esterilización Radiación

Condiciones de conservación y almacenamiento.

Condiciones de almacenaje Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa.

Condiciones de transporte Transportar alejado de la luz solar directa

Duración 24 meses desde la fabricación

Seguridad en uso

Inflamable: En su forma líquida es inflamable; úsela en zonas ventiladas. Evite su uso cerca de llamas y fuentes de incendio. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Libre de Latex: Si

Libre Alcohol: Si

Embalaje y referencias

Código Bbraun

5036

Descripción

ASKINA® Barrier Film Spray

Medida

Frasco 28ml

Caja de Empaque

Caja x 12 unidades

