



Información Administrativa

Fabricante:	Winner Medical Co. Ltd. Winner Industrial Park, No 660 Bulong Road, Longhua District, 518109 Shenzhen, China
Fabricante Legal	B. Braun Medical AG, Schwarzenberg Weg 73-79, 34212 Mesulgen, Alemania.
Importación y Distribución:	B. Braun Medical Spa Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Descripción, composición y propiedades del dispositivo

Principio Activo Apósito con forma de talonera de espuma hidrofílica respirable de 6x5.5x11.cm con capacidad de absorción no adherente con capa exterior de poliuretano impermeable que incluye correa y dos laminas adherentes con velcro que permite que se mantenga en su sitio incluso con movimiento.

Nombre Comercial Askina® Heel

Código B Braun WIN7240105
WIN7240110

Descripción

Askina® Heel apósito con forma de talonera está diseñado para prevenir la formación de lesiones por presión en el área del talón en pacientes con riesgo, al reducir y redistribuir la presión en esta área, adicionalmente la espuma hidrofílica tiene la capacidad de gestionar humedad y propiciar un ambiente para la cicatrización en presencia de una herida. El film de poliuretano en su capa externa es permeable al vapor lo que permita la gestión de exudado e impermeable al exterior protegiendo la zona de líquidos y bacterias. Su sistema de sujeción permite el ajuste y reajuste de este siendo de espuma suave compatible con la piel

Askina® Heel considera un empaque ecológico individual de papel que se alinea con la reducción de plástico en nuestra gama de productos, que incluye regla milimétrica para la evaluación del tamaño de las heridas.

Composición del dispositivo

Capa Exterior: Film Poliuretano

Capa Interior: Foam poliuretano



Indicaciones

- Modo de Uso
1. Asegurar que empaque y vigencia de Askina® Heel es apropiada.
 2. Abrir el empaque por borde superior, tomar el apósito y posicionar en el talón de paciente, retirar papel protector de velcros adherentes y adherir a cada costado del apósito.
 3. Medir cinta de sujeción al contorno del tobillo asegurando sujeción firme. Corte excedente de ser necesario.
 4. Asegure cinta sujeción a los velcros ubicados a cada lado del apósito y asegure buena sujeción.
 5. Askina® Heel puede ser usada hasta 7 días en caso de prevención de lesiones siempre que se mantenga limpio, seco. Si entra en contacto con exudado debe ser cambiado en la próxima curación.



Indicaciones

Askina® Heel está indicada en:

- Prevención de lesiones por presión en pacientes de riesgo en área del talón.
- Tratamiento de lesiones por presión I-IV.
- Tratamiento de heridas con exudado moderado a alto.
- Tratamiento de heridas quirúrgicas,
- Tratamiento de quemaduras.

Precauciones de Uso

Si se detectan signos de una reacción alérgica, suspenda el uso del producto y busque consejo de un profesional de la salud sobre el siguiente curso de acción.

Solo de uso externo.

Producto de un solo uso no reutilizar en caso de entrar en contacto con exudado.

No utilizar junto con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.

Contraindicaciones

El producto no debe utilizarse en personas sensibles o alérgicas a sus componentes.

No usar en caso de vencimiento.

IFU: si/no

Si

Proceso de esterilización

Médico estéril: Si/No Si

Método de esterilización Radiación

Condiciones de conservación y almacenamiento.

Condiciones de almacenaje Conservar en un lugar fresco y seco temperatura ambiente. Mantener alejado de la luz solar directa.

Condiciones de transporte Transportar alejado de la luz solar directa

Duración 3 años desde la fabricación

Seguridad en uso

Técnica: MRI, rayos X detectables No aplica

Libre de Latex: Si

Libre de DEHP: Si

Embalaje y referencias

Código Bbraun	Descripción	Medida	Caja de Empaque
WIN7240105	ASKINA® Heel	6x5.5x11.5 cm (225 cm ²)	Caja x 5 unidad
WIN7240110	ASKINA Heel	6x5.5x11.5 cm (225 cm ²)	Caja x 10 unidad

