



Información Administrativa

Fabricante	Zhende Medical Co. Ltd. Gaobu Town, 312035 Shaoxing, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Fabricante Legal	B. Braun Medical AG, Schwarzenberg Weg 73-79, 34212 Mesulgen, Alemania.
Importación y Distribución	B. Braun Medical Spa Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile
Version control	V1_06/2023

Descripción, composición y propiedades del dispositivo

Principio Activo:	Pasta para Ostomía de Carboxilmetilcelulosa y Goma Xantana, sin alcohol, sin látex.
Nombre Comercial:	Ally® Pasta para ostomías
Código Bbraun:	2022200
Descripción	<p>Pasta de ostomías sin alcohol, para rellenar cavidades, pliegues o arrugas de la piel alrededor del estoma.</p> <p>Proporciona un sellado entre el estoma y la placa del dispositivo de ostomía para reducir las fugas y proteger la piel de los efluentes irritativos del estoma.</p> <p>Incluye accesorio exprimidor para usar la totalidad</p>
Composición del dispositivo	Goma Xantana PB PIB
Indicaciones:	<p>La pasta Ally® está destinada a rellenar pliegues y arrugas en la piel intacta alrededor del estoma, mejorando el sello de la placa de ostomía a la piel.</p> <p>Está diseñada para reducir el riesgo de fugas, proteger la piel del efluente y puede ayudar a extender el tiempo de uso.</p> <p>La pasta Ally® está especialmente recomendada para personas que tienen hundimientos o pliegues en la piel o su estoma.</p> <p>Uso en prevención y manejo de complicaciones en piel periestomal de ostomías digestivas y urinarias como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colostomía • Ileostomía • Urostomías

Indicaciones

Modo de Uso:

1. Asegúrese de que las manos y piel alrededor del estoma estén limpias y secas antes de aplicar la pasta.
2. Aplicar directamente desde el tubo sobre la piel o también directamente al a placa de ostomía. No aplicar en toda el área adhesiva de esta.
3. Si es necesario, alisar o moldear la pasta con hisopos de algodón humedecidos, una toallita o con el dedo enguantado o humedecido.
4. Después de colocar la placa de ostomía asegúrese de que encaje perfectamente alrededor del estoma presionando suavemente.
5. Retire la pasta residual del tubo con una toallita limpia. Vuelva a tapar el tubo herméticamente para evitar el contacto con la humedad.
6. Use el exprimidor del tubo para vaciar completamente.
7. La pasta puede ser retirada con agua templada o tibia, se puede dejar una pequeña cantidad de pasta residual en la piel al aplicar el siguiente dispositivo. Es mejor dejar un pequeño residuo que correr el riesgo de irritar la piel con una eliminación completa.



Precauciones de Uso

Si se detectan signos de una reacción alérgica, suspenda el uso del producto y busque consejo de un profesional de la salud sobre el siguiente curso de acción.

Solo de uso externo.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y tomar contacto con un profesional de la salud.

Contraindicaciones

El producto no debe utilizarse en personas sensibles o alérgicas a sus componentes.

No se recomienda uso en personas con sistema inmunológico deprimido o en tratamiento inmunosupresor.

No usar en prematuros o recién nacidos en cuidados en incubadora.

No usar en caso de vencimiento.

No usar si el tubo presenta daños o roturas.

Descartar en caso de notar cambios en la textura, color u olor de la pasta.

IFU: si/no

Si

Proceso de esterilización:

Médico estéril: Sí/No	No
Método de esterilización	Dispositivo no esterilizado

Condiciones de conservación y almacenamiento.

Condiciones de almacenaje	Conservar en un lugar fresco y seco por debajo de 25°C. Mantener alejado de la luz solar directa. No congelar
Condiciones de transporte	Sin restricción
Duración	3 años desde la fabricación

Seguridad en uso

Técnica: MRI, rayos X detectables	No aplica
Libre de Latex:	Sí
Libre de DEHP:	Sí
Libre de Alcohol:	Sí

Embalaje y referencias

Código Braun	Descripción	Medida	Caja de Empaque
2022200	Ally® Paste	80gr	Caja x 1 unidad, Incluye accesorio exprimidor de tubo

