

# DICARDIO® GEL

## DESCRIPCIÓN

Es un conductor eléctrico y eco-sónico, de color verde claro, diseñado para que la sonda o transductor se deslice con facilidad y suavidad sobre la piel en el momento de realizar el ecocardiograma; también puede ser usado en la realización de electrocardiogramas. No irrita la piel, no mancha la ropa, es soluble en agua y no deja residuos.

## REGISTRO

N/A

## COMPOSICIÓN

Polimero Carboxílico de alto Cross-linking, Monopropilenglicol, neutralizantes, secuestrantes, preservantes, electrolitos en solución, colorantes.

## INSTRUCCIONES

Aplicar suficiente Dicardio® Gel sobre el área de contacto o directamente sobre la superficie del electrodo. Luego de realizar el exámen, remueva el producto con papel absorbente.



## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

<b>ASPECTO</b>	Gel translúcido.
<b>COLOR</b>	Verde.
<b>AROMA</b>	Inodoro.
<b>pH</b>	6,5 - 7,5
<b>DENSIDAD</b>	No corresponde

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO SAP	PRODUCTO	FORMATO	EAN 13	DUN 14
2400159	DICARDIO® GEL	250 mL	7801000247876	17801000247873
2400163	DICARDIO® GEL PACK BIDÓN + APLICADOR	5,25 L	7801000247890	17801000247897

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SAP	DIMENSIONES DEL PRODUCTO					DIMENSIONES DE LA CAJA				
	ALTO	LARGO	FONDO	PESO	UNIDAD/CAJA	ALTO	LARGO	FONDO	VOLÚMEN	PESO CAJA
2400159	200 mm	51 mm	51 mm	326 g	12	203 mm	206 mm	115 mm	0,0048m <sup>3</sup>	4,2 Kg
2400163	250 mm	206 mm	125 mm	6.750 g	1	203 mm	206 mm	115 mm	0,0048m <sup>3</sup>	7,0 Kg

## ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

CÓDIGO SAP	PALLETIZADO					ENVASE PRIMARIO			ENVASE SECUNDARIO		
	CAJAS DE BASE	CAJAS DE ALTO	CAJAS/PALLET	ALTURA PALLET	BASE PALLET	MATERIAL	ESPESOR	PESO	MATERIAL	ESPESOR	PESO
240015	30	5	150	1,2 m	1 mx1,2 m	HDPE	5 -10 mm	30 g	C. CORRUGADO	4 mm	250 g
2400163	30	4	120	1,2 m	1 mx1,1 m	HDPE	5 -10 mm	130 g	C. CORRUGADO	4 mm	250 g

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**En caso de contacto ocular:** lavar primero con agua fría, remueva los lentes de contacto si los usa. Mantener los párpados abiertos y continuar enjuagando por 15 minutos. **En caso de ingestión:** consultar a un médico.

En caso de intoxicación o ingesta llame al CITUC

**CITUC | (2) 2635 3800**

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado.

## VIDA ÚTIL

36 meses.

## OTROS