

Cutimed® Sorbact®

Apósito antimicrobiano impregnado en DACC.

Descripción

Gama de apósitos de acción antimicrobiana, tratados con el éster de ácido graso DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro), hidrófobo (genera una alta repelencia al agua), para tratamiento de heridas infectadas, colonizadas o contaminadas. Cutimed® Sorbact® disminuye el número de microorganismos, limpia la herida y crea las condiciones necesarias para la cicatrización.

Características


- La cubierta fuertemente hidrofóbica entrega al apósito sus propiedades de unión a microorganismos, por acción física.
- Actúa mediante una unión rápida y efectiva entre DACC y el microorganismo, lo que induce la inactivación de los microorganismos. Esta unión es irreversible en un ambiente húmedo. Una vez unidos, el metabolismo de los microorganismos se enlentece y su replicación se minimiza.
- Las bacterias patógenas y hongos de la herida se unen de modo irreversible al apósito por la interacción hidrofóbica y son removidos de la herida en cada cambio de apósito.
- Eficacia de amplio espectro: efectivo para bacterias gram positivo, gram negativo y hongos, incluido biofilm.
- Eficaz contra microorganismos resistentes a los antibióticos como MRSA y VRE.
- Reduce el nivel de bacterias y apoya el proceso normal de cicatrización.
- No hay desarrollo de resistencia bacteriana o micótica.
- No hay citotoxicidad.
- No hay riesgo de alergia.
- No promueve la liberación de endotoxinas bacterianas ya que los microorganismos quedan unidos al apósito, pero no son destruidos.
- Reduce el olor mediante la reducción de la carga microbiana.
- Reduce el dolor de la herida en heridas infectadas.
- Excelente capacidad de absorción.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.
- No tiñe el lecho de la herida.

Esterilización

- Rayos gamma.

Almacenamiento

- A 25°C, 60% humedad relativa. Proteger de la luz.

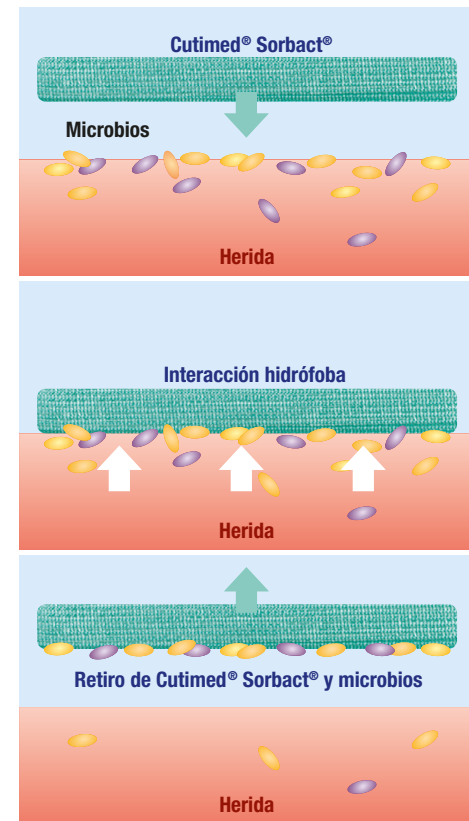

Cutimed® Sorbact®

Apósito antimicrobiano impregnado en DACC.

Recomendaciones de uso

- Para tratamiento de heridas contaminadas, con exudado, colonizadas o infectadas independientes de su etiología, así como heridas postoperatorias, heridas traumáticas, heridas luego de la extirpación de fístulas y abscesos, heridas crónicas tales como: úlceras venosas, arteriales, diabéticas y úlceras por presión. Recomendado también para infecciones fúngicas dérmicas. Indicaciones de uso: Se recomienda no usar con ungüentos o cremas que puedan interferir en el efecto de unión al microorganismo. La humedad de la herida es esencial para asegurar la eficacia de Cutimed® Sorbact® y evitar que el apósito se adhiera a la herida. En heridas secas o con bajo exudado se recomienda la utilización de apósitos Cutimed® Sorbact® Gel.
- La frecuencia de cambio de apósitos depende del nivel de exudado y del grado de contaminación de la herida. Se recomienda cambiar el apósito cada 1 a 3 días. En heridas que muestran signos de infección clínica, es recomendable una inspección más frecuente de la herida y puede ser considerado un tratamiento sistémico.



Composición

- 1. Apósito
Capa 1: Unión y eliminación de los microorganismos: Gasa de acetato de color impregnado con DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro).
Capa 2: Transporte de exudado de herida: Gasa de algodón.
Capa 3: Unión y eliminación de microorganismos: Gasa de acetato de color impregnado con DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro).
Capa 4: Núcleo absorbente: 75% viscosa y 25% poliéster.
Capa 5: Resistente al agua: Papel de seda impregnado con DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro).
Capa 6 y 7: Cubierta.
Tela no tejida hecha de celulosa, rayón y poliéster, unido con acetato de vinilo.
- 2. Tórula y Malla
Tórula de tela de acetato cubierta con DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro).
- 3. Mecha y Venda
Mecha y venda de tela de algodón cubierta con DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro).



Procedencia

Alemania

Planta Fabricante

Abigo Medical AB, Sweden

Fabricante Legal

BSN Medical GMBH, Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE

Presentaciones Cutimed® Sorbact®

Código	Código Cenabast	Descripción	Unidad de Venta
72162-00000	-	Apósito 10cm x 10cm	Caja x 40 Unidades
72163-00000	-	Apósito 10cm x 20cm	Caja x 20 Unidades
72164-00000	-	Malla 4cm x 6cm	Caja x 40 Unidades
72165-00000	100004027	Malla 7cm x 9cm	Caja x 40 Unidades
72166-00000	-	Mecha 2cm x 50cm	Caja x 20 Unidades
72167-00000	-	Rollo 5cm x 200cm	Caja x 10 Unidades