

# Jobst® UlcerCARE™

Calcetín compresivo doble capa de alta compresión.

## Descripción

Calcetín compresivo doble capa de alta compresión (40 mmHg), para pacientes con úlcera venosa activa. Consta de una primera capa (interna) que es un calcetín blanco que se utiliza las 24 hrs del día, y una segunda capa (externa) que es un calcetín beige con cierre para facilitar su colocación, ésta se utiliza durante el día. Ambos calcetines otorgan una compresión nominal de 40 mmHg.

## Características

- Buen calce y compresión dado por sistema de 2 capas.
- La capa interna (blanca), se utiliza las 24 hrs del día, por lo que, el kit trae dos unidades para contar con una de repuesto y permitir el lavado.
- La capa externa (beige) posee un cierre para facilitar la colocación y no posee puntera, por lo que, este sistema permite seguir usando su calzado habitual. Esta capa la utiliza sólo durante el día, se la coloca en la mañana al levantarse y se la retira en la noche al acostarse.
- El cierre de la capa externa puede estar ubicado al lado derecho o izquierdo, para elegir el lado contrario a la úlcera de ser posible.
- Cierre reforzado en su interior, no genera roce ni incomodidad.
- El cierre posee además un gancho removible para facilitar su manejo, especialmente, en adultos mayores.
- Diseño anatómico, requiere seleccionar la talla adecuada de acuerdo al diámetro del tobillo y pantorrilla, de modo de otorgar la compresión correcta.
- Muy costoeffectivo, duración mínima de 6 meses con uso diario y cuidados requeridos (lavado con detergente suave, sin aplicar cloro ni químicos, agua fría o tibia, secado sin exposición a ninguna fuente de calor).
- Minimiza el trastorno en la vida diaria del paciente: permite mantener el uso de calzado y ropa habitual.
- Se recomienda su uso una vez que se ha reducido el edema.
- Vigencia 3 años.
- Libre de látex.

## Esterilización

- No estéril.

## Almacenamiento

- En lugar fresco y seco.

## Recomendaciones de uso

- Para el tratamiento del paciente con úlcera venosa activa una vez reducido el edema y para la prevención de reaparición de úlceras venosas. Indicado para paciente con insuficiencia venosa crónica con requerimiento de terapia compresiva de alta compresión.

## Composición

- Calcetín de compresión blanco: 79% poliamida; 16% elastano; 5% seda.
- Media de compresión beige con cierre: 76% poliamida; 24% elastano.



**LATEX  
FREE  
FORMULA**

# Jobst® UlcerCARE™

Calcetín compresivo doble capa de alta compresión.

## Procedencia      Certificaciones de calidad

EEUU

ISO 13485 / FDA

## Presentaciones Jobst® UlcerCARE™

Código	Descripción	Unidad de Venta
73631-00011	Talla S c/cierre DER	Caja individual
73631-00012	Talla M c/cierre DER	Caja individual
73631-00013	Talla L c/cierre DER	Caja individual
73631-00014	Talla XL c/cierre DER	Caja individual
73631-00015	Talla XXL c/cierre DER	Caja individual
73631-00001	Talla S c/cierre IZQ	Caja individual
73631-00002	Talla M c/cierre IZQ	Caja individual
73631-00003	Talla L c/cierre IZQ	Caja individual
73631-00004	Talla XL c/cierre IZQ	Caja individual
73631-00005	Talla XXL c/cierre IZQ	Caja individual

## Tabla de Tallas

Puntos de medición	Tamaño			
	S	M	L	XL
Tobillo	18-21 cm	21-24 cm	24-27 cm	27-30 cm
Pantorrilla	29-35 cm	34-41 cm	40-47 cm	46-54 cm