

Gypsona®

Venda de yeso de París.

Descripción

- Gasa simple uniformemente impregnada de yeso de la más alta calidad.
- Fraguado rápido.
- Mínimo desprendimiento de yeso desde la venda.
- Molde de acabado liso, brillante y homogéneo con máxima fuerza y resistencia.

Características

- Inmovilización rígida de extremidades.
- Reducción de fracturas.
- Elaboración de férulas de yeso.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener lejos del calor.
- Almacenar bajo 25°C.
- Sin caducidad definida, se recomienda su uso antes de 3 años de su fabricación.

Esterilización

- No estéril.

Almacenamiento

- En un lugar seco, limpio y sin exposición directa a la luz solar o al agua.

Recomendaciones de uso

- Seleccionar y preparar todos los implementos que se necesitarán para la realización del molde de yeso.
- Aplicar el vendaje tubular directamente sobre la extremidad a vendar.
- Aplicar el acolchado sintético Soffban® para proteger la extremidad antes de la aplicación del yeso.
- Sumergir la venda de yeso en un balde con agua entre 20°C y 25°C hasta que esté completamente cubierta. Hacerlo en un ángulo de 45° separando el extremo de la venda con el pulgar (Al ingresar al agua en un ángulo de 45°, el vástago interno de la venda, en forma de cruz, permite que ésta se moje uniformemente tanto en su interior como en el exterior). Retirar a los 2 a 3 segundos o cuando haya dejado de burbujear. Exprimir suavemente el exceso de agua.
- Aplicar la venda de distal a proximal sin ejercer compresión sobre la extremidad. A los 30 minutos de aplicado el yeso, éste presenta la mitad de su resistencia total, alcanzando su máxima dureza dentro de 24 horas de aplicado el vendaje. Antes de 24 horas no es recomendable ejercer presión sobre el yeso.

Composición

- Sustrato: venda de gasa de puro algodón blanqueada con agua oxigenada (H₂O₂).
- Peso mínimo: 23 g/m².
- Mezcla de yeso: masa de yeso de París compuesta de más del 85% de yeso natural (sulfato de calcio hemi-hidratado) y aditivos (compuestos que permiten que el yeso se adhiera a la venda). Peso mínimo: 365 g/m².

Procedencia

EEUU

Certificaciones de calidad

ISO 13485



Gypsona®

Venda de yeso de París.

Presentaciones Gypsona®

Código	Código CENABAST	Descripción	Unidad de Venta
73461-00090	100001556	10cm x 3mt	Caja x 12 Unidades
73461-00091	100001557	12.5cm x 3mt	Caja x 12 Unidades
73461-00092	100001558	15cm x 3mt	Caja x 12 Unidades
73461-00094	-	20cm x 4mt	Caja x 12 Unidades