

Comprilan®

Venda de corta extensibilidad 100% algodón.

Descripción

Comprilan® es un vendaje de corto estiramiento, que funciona a partir del principio de aplicar poca presión en el momento en que el músculo descansa o no está activo. Cuando el músculo se activa, como el de la pantorrilla al caminar, el vendaje de poca elasticidad aplica una resistencia sobre el músculo que también se conoce con el nombre de presión de trabajo.

La resistencia o presión de trabajo que ejerce el vendaje de corto estiramiento Comprilan® se debe a su característica de estiramiento limitado. Comprilan® sólo se estira un 90% o menos que su largo. Esto es opuesto a lo que sucede con los vendajes de alta elasticidad que se estiran hasta 3 veces su largo. La característica de poca elasticidad permite que Comprilan® se utilice durante el descanso y en actividades.

Características

- El tejido de interlock otorga esta característica de poca elasticidad que asegura una presión consistente.
- Anatómicamente conformada para permitir la libertad de movimiento.
- Excelente tolerancia en la piel.
- Durable y resistente.
- Puede ser lavada en múltiples oportunidades a 40° sin perder sus características.
- Los extremos no se deshilachan.
- Tejido de tacto suave.
- Baja presión con la extremidad en reposo, alta presión con la extremidad en trabajo.
- Permeable al aire.
- Fácil de aplicar.
- Favorece la eliminación de estasis linfático.
- Color beige.
- Libre de latex.
- Vida útil: 5 años.

Esterilización

- No estéril.

Almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco.

Recomendaciones de uso

- Para uso en manejo de edema y linfedema: Varicosis, insuficiencia venosa crónica, fleboedema, tromboflebitis, trombosis venosa profunda, tratamiento post operatorio, linfedema primario y secundario.

Composición

- 100% algodón.

Procedencia

EEUU

Certificaciones de calidad

ISO 13485 / FDA



Comprilan®

Venda de corta extensibilidad 100% algodón.

Presentaciones Comprilan®

Código	Descripción	Unidad de Venta
01027-00000	8cm x 5mt	Caja individual
01028-00000	10cm x 5mt	Caja individual