

Jobst® For Men

Calcetín compresivo terapéutico para prevención y tratamiento de insuficiencia venosa crónica.

Descripción

Calcetín compresivo para la prevención y tratamiento del paciente con insuficiencia venosa crónica, desde piernas cansadas o pesadas, presencia de telangectasias, venas varicosas, edema, cambios de coloración de la piel hasta úlceras venosas cicatrizadas (desde etapa C0 a C6), generando un gradiente de compresión que favorece el retorno venoso y la microcirculación.

Características

- Calcetín compresivo graduado, la mayor compresión se encuentra a nivel de tobillo y va decreciendo hasta la parte superior de la pierna.
- Material extremadamente durable, fibras fuertes y suaves, resistentes al uso y al desgaste.
- Con fórmula especial anti olor, con microfibras suaves que absorben la humedad.
- Costura plana en la punta y amplio margen de movimiento en los dedos.
- Diseño acanalado.
- Banda no constrictiva de sujeción.
- Diversidad de modelos: rodilla y muslo.
- Diseño anatómico, requiere seleccionar la talla adecuada de acuerdo al diámetro del tobillo y pantorrilla, de modo de otorgar la compresión correcta.
- Muy costo-efectivo, duración mínima de 6 meses con uso diario y cuidados requeridos (lavado con detergente suave, sin aplicar cloro ni químicos, con agua fría o tibia, secado sin exposición a ninguna fuente de calor).
- Vigencia 5 años.
- Libre de látex.

Esterilización

- No estéril (no requiere).

Almacenamiento

- En lugar fresco y seco.

Recomendaciones de uso

Para la prevención y el tratamiento del paciente con insuficiencia venosa crónica.

- **Compresión de soporte 8-15mmHg:** Para piernas cansadas, pesadas (etapa C0).
- **Compresión terapéutica de 15-20mmHg:** Para uso desde piernas cansadas o pesadas sin signos visibles de insuficiencia venosa hasta la presencia de telangectasias (etapa C0-C1).
- **Compresión terapéutica de 20-30mmHg:** Para uso cuando hay presencia de telangectasia hasta presencia de venas varicosas o edema. También indicado para la prevención de recurrencia de úlceras venosas, post quirúrgico y post escleroterapia (etapa C1-C3).
- **Compresión terapéutica de 30-40mmHg:** Para venas varicosas y edema, también en presencia de cambios de coloración de la piel y lipodermatoesclerosis o úlcera venosa cicatrizada (etapa C3-C5).

Composición

- 76% nylon, 24% spandex.



Negro

Compresión

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg



Muslo

Rodilla



Jobst® For Men

Calcetín compresivo terapéutico para prevención y tratamiento de insuficiencia venosa crónica.

Procedencia Certificaciones de calidad

EEUU

ISO 13485 / FDA

Presentaciones Jobst® For Men

- Tallas: S-M-L-XL.
- Modelos: Rodilla y muslo.
- Compresión: 15-20mmHg, 20-30mmHg, 30-40mmHg.
- Colores: Negro.

Presentaciones Jobst® For Men en Convenio Marco

Código	Descripción	Unidad de Venta
77160-00031	Comp. 20-30 Rodilla Punt. Cerrada S Negro	Caja individual
77161-00030	Comp. 20-30 Rodilla Punt. Cerrada M Negro	Caja individual
77162-00031	Comp. 20-30 Rodilla Punt. Cerrada L Negro	Caja individual
77163-00030	Comp. 20-30 Rodilla Punt. Cerrada XL Negro	Caja individual

*Consulta por la variedad de tallas, modelos, compresión y colores a su representante de ventas.

Tabla de Tallas

Puntos de medición	Tamaño			
	S	M	L	XL
Tobillo	18-21 cm	21-25 cm	25-29 cm	29-33 cm
Pantorrilla	28-38 cm	30-42 cm	32-46 cm	34-50 cm
Muslo	40-62 cm	46-70 cm	54-78 cm	60-81 cm