

Leukomed® T

Apósito transparente adhesivo semioclusivo.

Descripción

Apósito transparente estéril semioclusivo, de poliuretano con adhesivo de poliacrilato. El adhesivo está completamente cubierto con papel blanco siliconado y por una lámina de aplicación superior con una banda roja que facilita su uso.

Características

- Semipermeable: permeable al vapor de agua y oxígeno e impermeable ante microorganismos y contaminantes externos.
- Resistente al agua.
- Bien tolerado por la piel, incluso por la piel sensible.
- Radiotransparente.
- Transparente, permite inspección visual en cualquier momento.
- Buen poder adhesivo, sin ser agresivo.
- Flexible, se adapta bien a los contornos.
- El material del apósito permite su rotulación en toda la superficie.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.



Esterilización

- Óxido de Etileno.

Almacenamiento

- En condiciones secas, alejado de la luz y el calor.

Recomendaciones de uso

- Para cubrir heridas planas, como heridas post operatorias o cirugías mínimamente invasivas. Uso por un período de uno a varios días, dependiendo del estado de la herida y la condición de la piel.
- Aplicar en la zona elegida, fijando todos los bordes con firmeza, y al final, retirar la película superior desde la banda roja.



Composición

- Sustrato: Película de poliuretano (peso: 18 ± 2 g/m²)
- Adhesivo: Poliacrilato (peso: 28 ± 3 g/m²)

Procedencia Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / CE

Presentaciones Leukomed® T


Código	Descripción	Unidad de Venta
72381-00000	5 cm x 7.2 cm	Caja x 50 Unidades
72381-00001	8 cm x 10 cm	Caja x 50 Unidades
72381-00008	10 cm x 12.5 cm	Caja x 50 Unidades
72381-00014	10 cm x 25 cm	Caja x 50 Unidades
72381-00009	15 cm x 20 cm	Caja x 50 Unidades

**LATEX
FREE
FORMULA**


Leukomed® T

Apósito transparente adhesivo semioclusivo.


Paso a Paso para una correcta aplicación de Leukomed® T

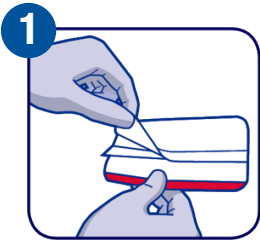


1 Remueva una lámina del papel protector posterior.

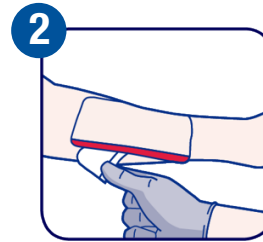

2 Aplique en la zona elegida, asegúrese que la piel se encuentre limpia y seca. Remueva el resto del papel protector.

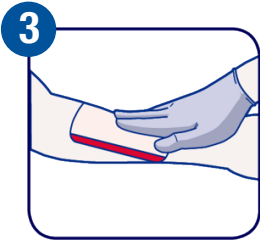

3 Alise la película con la yema de los dedos, especialmente por los bordes para su completa fijación.

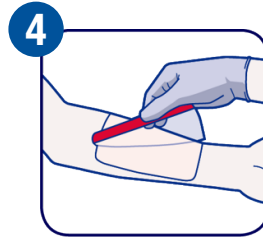

4 Retire la lámina transparente superior, comenzando por la banda roja de fácil aplicación en un solo movimiento.