


ASKINA® SiNet Plus

Ficha Técnica

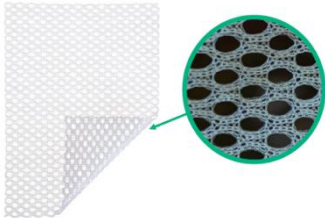

Información Administrativa

Fabricante:	Winner Medical Co., Ltd. Winner Industrial Park, No 660 Bulong Road, Longhua District, 518109 Shenzhen, China
Fabricante Legal	B. Braun Medical AG, Schwarzenberg Weg 73-79, 34212 Mesulgen, Alemania.
Importación y Distribución:	B. Braun Medical Spa Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile
Versión control	V2_03/2025

Descripción, composición y propiedades del dispositivo

Principio Activo	Apósito de silicona de contacto de material tejido de punto, recubierto en ambas caras de una capa de silicona adherente suave, de gran adaptabilidad de 10 x 7,5cm.
Nombre Comercial	Askina® SiNet
Código B Braun	5197510

Descripción:

Askina® SiNet Plus es un apósito de silicona de dos caras que consiste en un tejido revestido por ambas caras con adhesivo de silicona. El diseño de silicona de doble cara facilita su uso con apósitos absorbentes secundarios. Está indicada para heridas exsudativas, no exudativas o piel frágil.


La estructura de malla abierta de Askina® SiNet Plus permite que el exudado pase a un apósito absorbente secundario. El uso de Askina® SiNet Plus puede reducir la adherencia directa del apósito absorbente a la herida, reduciendo así el dolor de los traumatismos y cambios secundarios del apósito y el riesgo de maceración.

Composición del dispositivo

Tejido de punto
Adhesivo de silicona
Protector antiadherente

Ventajas

- Diseñado para proteger el lecho de la herida del cambio de los apósitos
- Protege el tejido de granulación y superficies epitelizadas
- Alivia el dolor con el cambio de apósitos
- Puede combinarse con apósitos secundarios; Askina® Foam , Askina® Calgitrol u otros.
- Maleable y adaptable a diferentes formas y superficies.

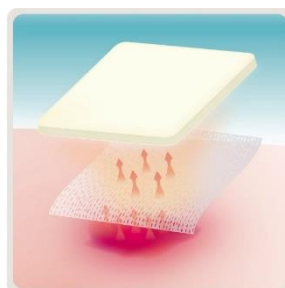

Indicaciones

Modo de Uso

1. Limpie el área de la herida de acuerdo con protocolo vigente. Asegúrese de que la piel circundante de la herida está seca. Es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.
2. Seleccione el tamaño de apósito de Askina® SilNet Plus suficientemente grande como para cubrir los márgenes de la herida al menos de 2 a 3 cm. En caso necesario corte el apósito según sea conveniente.
3. Retire las capas de protección. Para evitar que Askina® SilNet Plus se pegue a los dedos usar guantes húmedos. Colocar el apósito sobre la lesión y apretar suavemente para garantizar su adherencia.
4. De acuerdo la a cantidad del exudado cubrir con un apósito secundario absorbente.
5. Sujetar con vendaje o esparadrapo.
6. El intervalo de cambio del apósito puede ser de varios días, máximo una semana. En caso de injerto no debe cambiarse hasta cinco días después de la fijación den injerto cutáneo.



Eliminación/Cambio del apósito:

- Askina® SilNet Plus puede utilizarse hasta 14 días, depende del estado de la herida y la piel circundante o las indicaciones médicas. Si los orificios de Askina® SilNet Plus están bloqueados, deberá cambiarse para evitar la maceración.
- El apósito absorbente secundario deberá cambiarse cuando esté saturado.
- Si hay signos de alergia, infección, exantema, etc., interrumpa el uso inmediatamente y consulte a un profesional médico.

La combinación del dispositivo con el producto:

- Askina® SilNet Plus puede utilizarse en combinación con un apósito absorbente secundario, y fijarse con un apósito de retención en caso necesario.
- Askina® SilNet Plus puede utilizarse en sistemas TPN como capa protectora.
- En caso de que sea clínicamente necesario, Askina® SilNet Plus puede utilizarse en combinación con corticoides tópicos, antimicrobianos tópicos o hidrogel.
- Askina® SilNet Plus puede utilizarse debajo de vendajes de compresión.

Indicaciones

Askina® Silnet está indicado para el tratamiento de para una amplia gama de heridas exudativas, no exudativas o áreas con piel frágil,

- Quemaduras de primer y segundo grado.
- Injertos de espesor parcial y total.
- Heridas quirúrgicas y/o traumáticas.
- Desgarros de la piel, laceraciones.
- Ulceras por presión de fase I a IV.
- Ulceras venosas, arteriales.
- Ulceras Pie diabético.
- Epidermólisis Bullosa.
- Desgarros cutáneos, abrasiones cutáneas, ampollas.

7. Precauciones de Uso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando se utilice Askina® SilNet Plus junto con sistemas de TPN, registre siempre la cantidad de Askina® SilNet Plus utilizada para garantizar que no quede nada en la herida al cambiarlo. 2. Si se utiliza Askina® SilNet Plus en pacientes con epidermólisis bullosa, se debe extremar la vigilancia al cambiar el apósito. 3. Si se utiliza Askina® SilNet Plus en quemaduras tratadas con injertos de malla: evite ejercer presión innecesaria sobre el apósito. 4. Si se utiliza Askina® SilNet Plus después de un rejuvenecimiento facial: evite ejercer presión sobre el apósito. Levante y vuelva a colocar el apósito al menos cada dos días. 5. Si se utiliza Askina® SilNet Plus en heridas sangrantes o con exudado de alta viscosidad, el apósito debe cubrirse con una compresa absorbente húmeda. 6. Si se utiliza Askina® SilNet Plus para la fijación de injertos de piel, el apósito no debe cambiarse antes del quinto día después de la aplicación. 7. Si se utiliza Askina® SilNet Plus en quemaduras tratadas con injertos de malla o después de un rejuvenecimiento facial, podrían quedar marcas si el producto no se usa correctamente. 7. No reutilizar. Reutilizarlo puede causar contaminación cruzada e infecciones graves. 8. Askina® SilNet Plus es estéril. No lo utilice si el envase interior está dañado o abierto antes de su uso. No lo reesterilice.
Contraindicaciones	1.
IFU: si/no	Si

Proceso de esterilización:	
Médico estéril: Si/No	Si
Método de esterilización	Oxido Etileno

Condiciones de conservación y almacenamiento.	
Condiciones de almacenaje	Askina® Silnet Plus debe almacenarse en un ambiente seco, ventilado, sin gases corrosivos, lejos del fuego y de materiales inflamables. Evitar la luz solar directa.
Condiciones de transporte	El transporte debe alejarse del peso, el sol y el goteo de la lluvia.
Duración	3 años

Seguridad en uso	
Técnica: MRI, rayos X detectables	No aplica
Libre de Latex:	Si
Libre de DEHP:	Si

Embalaje y referencias			
Código B Braun	Descripción	Medida	Caja de Empaque
WIN5197510	Askina® Silnet 10x7.5cm	10 x 10 cm	Caja x 10 unidad



B. Braun Medical Spa | Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana | Chile
Tel. 2 2440 7100 | www.bbraun.cl |