


# MonoPlus®

## FICHA TÉCNICA

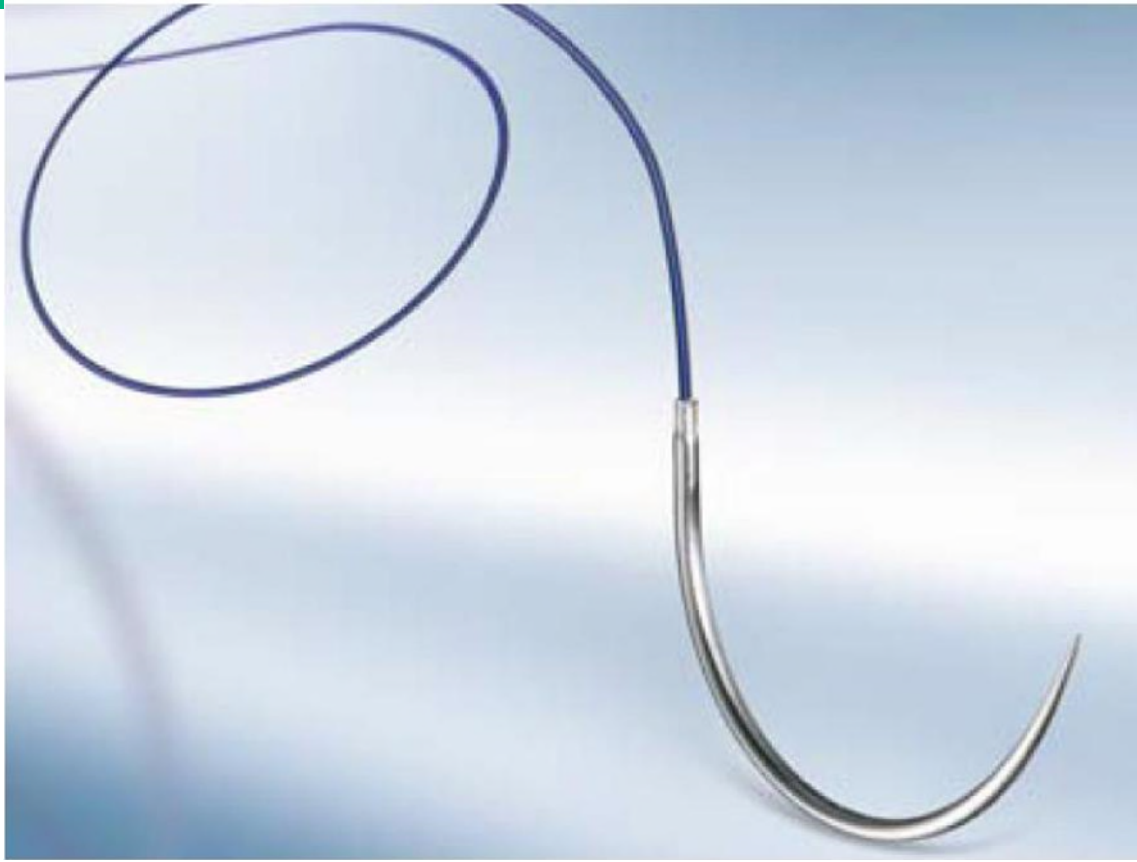

## 1 DESCRIPCIÓN

Sutura estéril absorbible monofilamento, compuesta por homopolimero de poli-p-dioxanona, teñido de violeta con colorante D&C N°2 (60725).

## 2 INDICACIONES

Monoplus® está indicado para la aproximación de tejidos blandos cuando se desea un soporte prolongado de la herida (más de 4 semanas), cierre de pared abdominal. Monoplus® puede ser utilizado en cirugía pediátrica de tejidos cardiovasculares. En cirugía vascular, Monoplus® está indicado para suturar vasos periféricos antológicos. En ortopedia para la plastia de los tendones.

## 3 ESPECIFICACIONES

Material:	Poli-p-dioxanona
Recubrimiento:	Sin recubrimiento
Estructura:	Monofilamento
Colores:	Violeta
Tamaños USP:	2 (métrico 5) a 7/0 (métrico 0,5)
Perfil de absorción:	Hidrolisis, absorción de masa completa en 180 a 210 days Retención de la resistencia a la tracción del 50% a los 28 days ≤ USP 4/0, a los 35 days ≥ USP 3/0
Esterilización:	Óxido de etileno

## 4 ALMACENAMIENTO / EMPAQUE / VIDA ÚTIL

Almacenamiento:	Bajo techo en un lugar limpio y seco No someter a las temperaturas superiores de 50°C
Vida útil:	5 años
Empaque:	DDP, RCP
Fabricado por:	B. Braun Surgical S.A., España


## 5 CERTIFICACIONES

La sutura MonoPlus® tiene la marca CE y está clasificada como un producto de clase III.



**6 ETIQUETADO**

Descripción	
1.	Aguja
2.	Descripción de sutura
3.	Nombre de producto
4.	Longitud de la hebra
5.	USP y EP tamaño
6.	Código de lote
7.	Fecha de caducidad
8.	Ver instrucciones de uso
9.	No re-esterilizar, uso único
10.	Código de material
11.	Método de esterilización
12.	Cantidad unidades

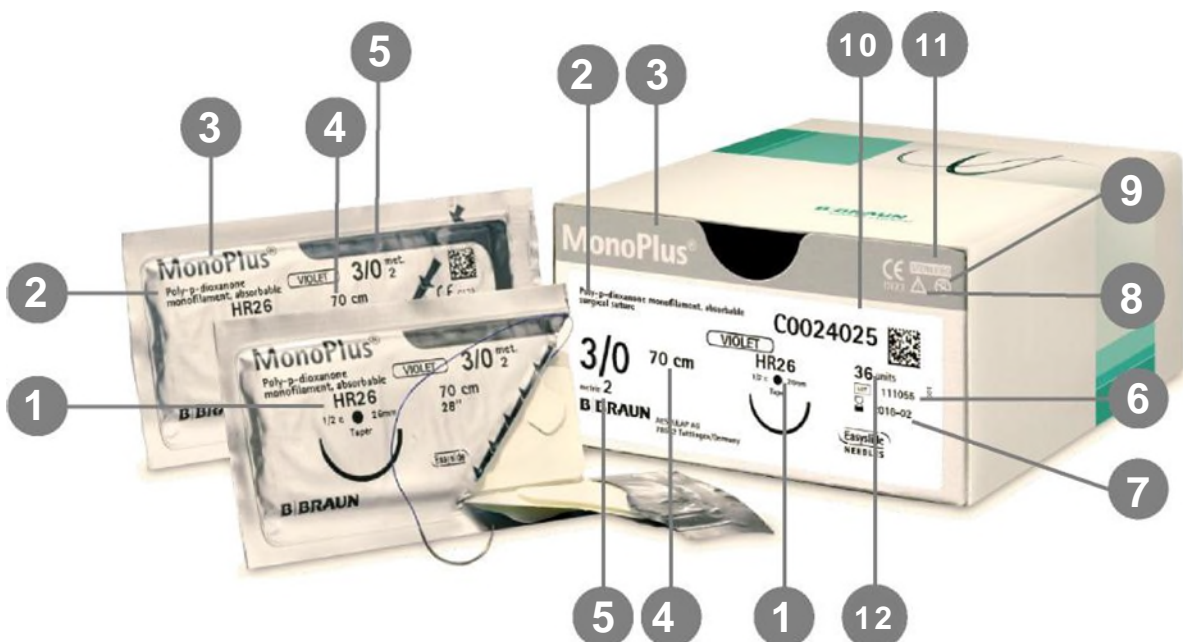

## Nomenclatura de agujas B. Braun

A		B		C		12	D	
Angulo de aguja o curvatura		Cuerpo de aguja		Punta de aguja		Longitud de la aguja	Agujas especiales	
S	1/8 de circulo	R	redondo	C	corte corto	La distancia entre	ff	de cuerpo extrafino
V	1/4 de circulo	S	cortante	T	tipo trocar	la punta de la aguja y su fin,	f	de cuerpo fino
D	3/8 de circulo	G	trapezoidal	S	tipo esternón	medido a lo largo de	s	de cuerpo pesado
H	1/2 de circulo	L	con micro grabado	N	punta roma	la aguja en mm.	ss	de cuerpo extrapesado
F	5/8 de circulo		tipo lanceta	B	con protección		v	break-off
G	recta			MP	de precisión		b	aguja negra
P	curvatura progresiva			M	micropunta			
J	hook o gancho			m	micro aguja			
SK	aguja tipo esquí			mV	micro vascular			

Ejemplo:

H	R	C	26	b
---	---	---	----	---

HRC26 → ½ circulo, aguja redonda con punta de corte corta, 26 mm de longitud, negra.

Angulo de aguja o curvatura	Otras
<p>S 1/8 de circulo V 1/4 de circulo D 3/8 de circulo H 1/2 de circulo F 5/8 de circulo</p>	<p>G recta P curvatura progresiva J hook o gancho SK aguja tipo esquí</p>