



Información Administrativa

Fabricante:	Winner Medical Co. Ltd. Winner Industrial Park, No 660 Bulong Road, Longhua District, 518109 Shenzhen, China
Fabricante Legal	B. Braun Medical AG, Schwarzenberg Weg 73-79, 34212 Mesulgen, Alemania.
Importación y Distribución:	B. Braun Medical Spa Av. Puerta Sur 03551, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile
Versión control	V1_04/2024

Descripción, composición y propiedades del dispositivo


Principio Activo	Apósito de espuma compuesto de 2 capas: una espuma de poliuretano no adherente de alta capacidad de absorción y una película de poliuretano transparente y protector impermeable al agua y resistente a las bacterias.
Nombre Comercial	Askina® Foam
Código B Braun	WIN7241010, WIN7242110, WIN7242010

Descripción:

Askina® Foam es un apósito absorbente que absorbe el exudado de la herida a través de la espuma de poliuretano y proporciona un entorno húmedo de cicatrización de la herida para facilitar su curación, gracias a la presencia de una capa exterior de película de poliuretano permeable al vapor y resistente al agua y las bacterias. Al no ser adherente puede reducir el dolor y traumatismo durante los cambios. Disponible en tallas 10x10cm, 10x20cm y 20x20cm.

Su capacidad de absorción evita la dispersión lateral del exudado. Cuenta con bordes termosellados que evitan la fuga del exudado.

Composición del dispositivo	Una película externa de poliuretano Espuma de poliuretano
-----------------------------	--

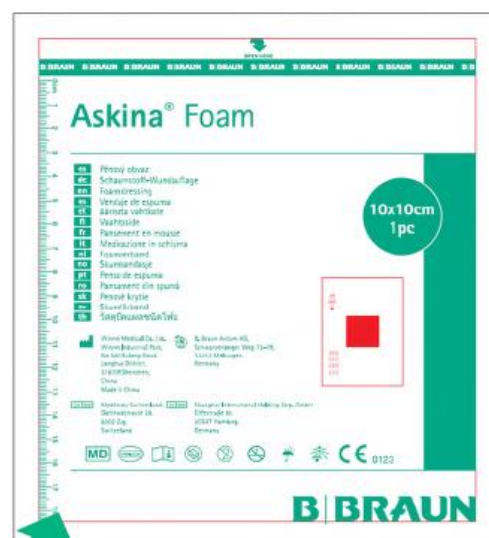

Indicaciones

Modo de Uso

1. Limpie el área de la herida de acuerdo con protocolo vigente. Asegúrese de que la piel circundante de la herida esta seca.
2. Seleccione el tamaño de apósito de Askina® Foam suficientemente grande como para cubrir los márgenes de la herida al menos de 2 a 3 cm. En caso necesario corte el apósito según sea conveniente.
3. Aplique con cuidado el lado de la espuma (lado blanco amarillento) directamente sobre la superficie de la herida y fíjelo.
4. Askina® Foam se puede fijar con un apósito secundario como rollo de gasa, venda elasticada o autoadhesiva, película transparente o cinta tubular suave,
5. El intervalo de cambio del apósito puede ser de varios días. Cambie el apósito antes de que este completamente saturado, o presente signo de fuga. No se debe utilizar un mismo producto durante más de 7 días.



Indicaciones

Askina® Foam está indicado para el tratamiento de úlceras con exudado moderado a intenso como:

- Úlceras de pie diabético
Úlceras por presión
- Úlceras Venosas, arteriales o mixtas
- Úlceras Arteriales
- Tratamiento de quemaduras
- Heridas Posquirúrgicas
- Heridas de origen traumático

Precauciones de Uso

Si se detectan signos de una reacción alérgica, suspenda el uso del producto y busque consejo de un profesional de la salud sobre el siguiente curso de acción.

Solo de uso externo.

Producto de un solo uso no reutilizar.

No utilizar junto con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.

Contraindicaciones

El producto no debe utilizarse en personas sensibles o alérgicas a sus componentes.

No usar en caso de vencimiento.

No usar en cavidades con exudado abundante o moderado ya que el apósito se expandirá al absorber el líquido.

IFU: si/no

Si

Proceso de esterilización:

Médico estéril: Si/No Si

Método de esterilización Radiación.

Condiciones de conservación y almacenamiento.

Condiciones de almacenaje Conservar en un lugar fresco y seco por debajo de 25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

Condiciones de transporte Transportar alejado de la luz solar directa

Duración 24 meses desde la fabricación

Seguridad en uso

Técnica: MRI, rayos X detectables No aplica

Libre de Latex: Si

Libre de DEHP: Si

Embalaje y referencias

Código Braun	Descripción	Medida	Caja de Empaque
WIN7241010	Askina® Foam 10x10cm	10 x 10 cm	Caja x 10 unidad
WIN7242110	Askina® Foam 10x20cm	10 x 20 cm	Caja x 10 unidad
WIN7242010	Askina® Foam 20x20cm	20x 20 cm	Caja x 10 unidad

