

TIRAS CONTROL ORTOFTALDEHÍDO

0,55% Disintek OPA
Tests Strips



DESCRIPCIÓN

Las **Tiras para Control de Orto-Ftaldehído 0,55% Disintek** están diseñadas para la medición cualitativa de la solución de Ortoftaldehído 0,55%. La cual se recomienda realizar en forma rutinaria antes de realizar procedimientos que impliquen la utilización de la solución de Ortoftaldehído.

→ INSTRUCCIONES DE USO

Sumergir totalmente la parte reactiva de la Tira para Control de Orto-Ftaldehído 0,55% Disintek en la solución a testear durante 20 segundos. Eliminar el exceso de solución agitando ligeramente la tira o con una toalla de papel. Leer el resultado 40 segundos después de haber sumergido la tira en la solución de Ortoftaldehído. Comparar el color con la coloración indicada en el envase.



Colores de muestra para
Producto Activo

→ ALMACENAMIENTO

Conservar las tiras en el frasco bien cerrado. Almacenar el frasco a una temperatura entre 15° y 30°C. Mantener el frasco en un lugar fresco sin humedad. Para asegurar la fecha de vigencia indicada en el envase, se recomienda no sacar la bolsa desecante que contiene en su interior.

→ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

→ PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentación	Código Producto Terminado (PT)	Unidad de Venta
Tiras Control Ortoftaldehído 50 tiras	2401266	por unidad