

# Cutimed® Sorbact® Hydroactive®

Apósito antimicrobiano con DACC de hidropolímero absorbente y debridante.

## Descripción

Apósito formado por una matriz de hidropolímero absorbente, con una malla de acetato con DACC (Dialquilcarbamoilo), de acción hidrófoba antimicrobiana para heridas con tejido desvitalizado y exudado moderado.

Está compuesto por una matriz de hidropolímero absorbente, con una malla de acetato con DACC (Dialquilcarbamoilo), tecnología Sorbact®, que reduce la carga bacteriana a través de la interacción hidrófoba. Está cubierto por una película semipermeable de poliuretano. Al entrar en contacto con el exudado, el hidropolímero cambia de color amarillo a marrón. La saturación del apósito es visible por la extensión de la decoloración. El apósito debe cambiarse si la decoloración alcanza un máximo de 1 cm desde el borde del hidropolímero.



## Características

- Absorbente, indicado para heridas con exudado moderado.
- Puede ser usado en heridas infectadas, contaminadas o colonizadas y también bajo terapias compresivas.
- Ayuda a reducir el exudado y el olor.
- Se debe cubrir la herida dejando a lo menos 2 cm de distancia de los bordes de la herida.
- Se debe aplicar el lado verde monocolor (sin impresión) sobre la herida.
- La frecuencia del cambio va a estar determinada por la herida, puede permanecer en la herida por máximo 4 días.
- No debe ser cortado.
- No superponer dos o más apósitos.
- No usar con ungüentos o pomadas que pueden interferir en la acción hidrófoba antimicrobiana.
- Vigencia 3 años.
- Libre de látex.



## Esterilización


- Radiación gamma.

## Almacenamiento

- Almacenar bajo 25°C, proteger de la luz solar directa.

## Recomendaciones de uso

- Indicado para heridas contaminadas, colonizadas o infectadas que requieren debridamiento y manejo de exudado moderado como: úlceras crónicas, heridas operatorias, dehiscentes o traumáticas.

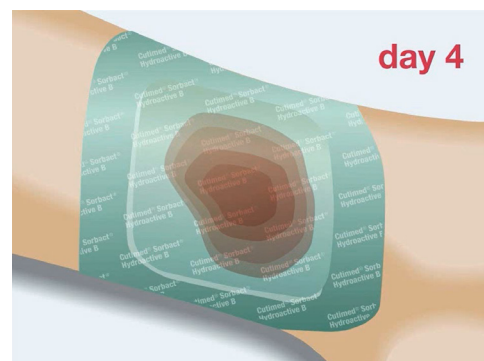

## Composición

- Película de poliuretano semipermeable de 30 um.
- Matriz de hidropolímero altamente absorbente. 1.7 - 2.1 kg/m<sup>2</sup>.
- Malla de acetato con DACC, tecnología Sorbact®. Peso: 60+5g/m<sup>2</sup>.

## Procedencia

Alemania

## Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE



# Cutimed® Sorbact® Hydroactive®

Apósito antimicrobiano con DACC de hidropolímero absorbente y debridante.

## Presentaciones Cutimed® Sorbact® Hydroactive®

Código	Descripción	Unidad de Venta
72646-00003	7cm X 8.5 cm	Caja x 10 Unidades
72646-00004	14cm X 14cm	Caja x 10 Unidades

