

Cutimed® Sorbion® Sachet S

Apósito de polímeros super absorbentes

Descripción

Apósito hidroactivo Cutimed® Sorbion® Sachet S tiene un núcleo interno con polímeros que permiten una elevada retención de exudado. La capa exterior está hecha con un fieltro de polipropileno sellado por ultrasonido. No contiene ninguna sustancia farmacológicamente activa, ni pegamentos o adhesivos. Las fibras de celulosa y los polímeros absorbentes se acoplan mecánicamente, incluso cuando entra en contacto con el exudado mantiene su estabilidad.

Características

- Fibras de celulosa modificadas y polímeros absorbentes gelificantes que permiten una máxima capacidad de absorción de fluidos. Manejo de heridas con exudado moderado a excesivo.
- Capacidad de retención del exudado manteniendo el ambiente húmedo en la herida, gracias a la Hydration Response Technology.
- Absorción vertical lo que evita el riesgo de maceración de los bordes de la herida.
- Desbridamiento suave. Los restos celulares y toxinas se adhieren al apósito y se eliminan en cada reemplazo.
- Asociado a la reducción de la carga bacteriana.
- Reducción de olores.
- Disminución de la concentración y actividad de las Metaloproteasas (MMPs).
- Propiedades antiinflamatorias.
- Amigable con la piel y bien tolerado.
- Eficaz bajo compresión.
- Vigencia de 3 años.
- Libre de látex.

Esterilización

- Óxido de Etileno.

Almacenamiento

- Lugar limpio y seco, sin exposición directa al sol. Temperatura no mayor de 25°C.

Recomendaciones de uso


- Tratamiento para heridas exudativas como lesiones por presión, úlceras de pie diabético, heridas que cicatrizan por segunda intención, dehiscencias, quemaduras de segundo grado, fístulas, drenajes, carcinomas ulcerosos y otro tipo de heridas exudativas. Proteger tejidos nobles como huesos y tendones con láminas de contacto no untuosa.
- Debe cambiarse antes de que el exudado penetre hacia el exterior o utilizar hasta cuatro días. Este tiempo máximo de uso depende del paciente y de la condición de la herida.
- Evite el contacto con las membranas mucosas (riesgo de sequedad y adherencia), área de los ojos, en heridas secas o con poco o ningún exudado.

Composición

- Núcleo interior: Partículas absorbentes de exudado (fibra de celulosa con polímeros super absorbente)
- Capa externa: Fieltro de polipropileno sellado por ultrasonido.



hydration
RESPONSE
technology

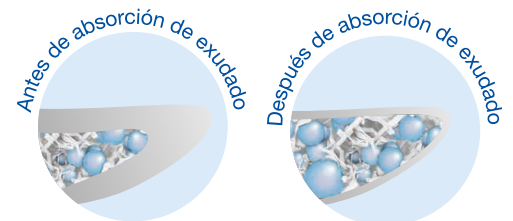

**LATEX
FREE
FORMULA**

Cutimed® Sorbion® Sachet S

Apósito de polímeros super absorbentes

Procedencia Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / DIN EN ISO 13485

Presentaciones Cutimed® Sorbion® Sachet S

Código	Descripción	Unidad de Venta
73232-00006	Cutimed Sorbion Sachet S 10x10cm	Caja x 10 unidades
73232-00009	Cutimed Sorbion Sachet S 10x20cm	Caja x 10 unidades