

# Leukomed<sup>®</sup> T Plus

Apósito transparente adhesivo semioclusivo con pad absorbente no adherente.

## Descripción

Apósito transparente adhesivo estéril semioclusivo con pad central absorbente. Posee bordes redondeados.

## Características

- Semipermeable: permeable al vapor de agua y oxígeno e impermeable ante microorganismos y contaminantes externos.
- Bien tolerado por la piel, incluso por la piel sensible.
- Radiotransparente.
- Transparente, permite inspección visual de la herida en cualquier momento.
- Buen poder adhesivo, sin ser agresivo.
- Resistente al agua.
- Flexible, se adapta bien a los contornos.
- El material del apósito permite su rotulación en toda la superficie.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.



## Esterilización

- Óxido de Etileno.

## Almacenamiento

- En condiciones secas, mantener alejado de la luz y el calor.

## Recomendaciones de uso

- Para cubrir heridas planas, como heridas post operatorias o cirugías mínimamente invasivas. Uso por un período de uno a varios días, dependiendo del estado de la herida y la condición de la piel.
- Aplicar en la zona elegida, fijando todos los bordes con firmeza, y al final, retirar la película superior desde la banda roja.

## Composición

- Sustrato: Película de poliuretano (peso: 18+2 g/m<sup>2</sup>)
- Adhesivo: Poliacrilato (peso: 28+3 g/m<sup>2</sup>)
- Pad central: Blanco, absorbente, de viscosa/polipropileno y cubierta con una red de polietileno (195 g/m<sup>2</sup> + 10%)



## Procedencia Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / CE

**LATEX  
FREE  
FORMULA**

## Presentaciones Leukomed<sup>®</sup> T Plus

Código	Descripción	Unidad de Venta
72382-00000	5 cm x 7.2 cm	Caja x 50 Unidades
72382-00001	8 cm x 10 cm	Caja x 50 Unidades
72382-00002	8 cm x 15 cm	Caja x 50 Unidades
72382-00003	10 cm x 25 cm	Caja x 50 Unidades
72382-00005	10 cm x 35 cm	Caja x 50 Unidades

# Leukomed<sup>®</sup> T Plus

Apósito transparente adhesivo semioclusivo con pad absorbente no adherente.


## Paso a Paso para una correcta aplicación de Leukomed<sup>®</sup> T Plus

### PASO 1



**Remueva** una lámina del papel protector posterior.

### PASO 2

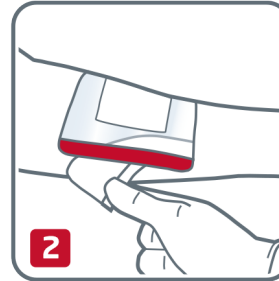

**Aplique** en la zona elegida, asegúrese que la piel se encuentre limpia y seca. Remueva el resto del papel protector.

### PASO 3



**Alise** la película con la yema de los dedos, especialmente por los bordes para su completa fijación.

### PASO 4



**Retire** la lámina transparente superior comenzando por la banda roja de fácil aplicación en un solo movimiento.