

Cutimed® Alginate

Apósito de alginato de calcio/sodio.

Descripción

Es un apósito estéril de alginato, compuesto por 2 capas no tejidas de alginato de calcio y sodio y 1 capa central de poliéster, que logran un ambiente óptimo de humedad fisiológica, además el poliéster mejora la resistencia a la tracción, logrando mantener la integridad en el retiro.

Características

- Textura blanda, altamente absorbente, confortable.
- Apósito gelificante rápido.
- Absorbe el exudado para formar un gel cohesivo húmedo, que ayuda al desbridamiento autolítico.
- Libre de carboximetilcelulosa y libre de plata.
- Este gel forma un ambiente húmedo en la herida y en la interfaz, apoya el proceso de cicatrización de la herida y reduce el riesgo de maceración de la piel circundante.
- El vendaje es fácilmente removido de forma íntegra con el mínimo dolor para el paciente.
- Se ajusta a todas las superficies de la herida, desde superficiales a cavitadas. Adecuado para su uso bajo vendajes de compresión.
- Posee propiedades hemostáticas, por formar una matriz que apoya la formación de coágulos de sangre, logra controlar el sangrado en heridas superficiales. Mantiene excelente integridad en estado seco y mojado.
- Dependiendo del grado de exudado, puede permanecer hasta 7 días en la herida. No usar por más de 30 días en forma continua.
- No usar en heridas secas, ni infectadas.
- Vigencia de 3 años.
- Libre de látex.
- Desechable
- Estéril
- Inviolabilidad del contenido, sellado.

Esterilización

- Rayos gamma.

Almacenamiento

- En lugar fresco y seco.
- Fuera de la exposición a la luz.
- Mantener entre 5°C y 25°C.

Recomendaciones de uso

- Para el uso en heridas con exudado moderado o alto, superficiales o profunda o en fase de granulación: úlceras de diversos orígenes (venoso, arterial), úlceras en las piernas, úlceras por presión, úlceras diabéticas, heridas cavitadas, heridas agudas, tales como las zonas donantes de piel, heridas post-operatorias, quemaduras superficiales y de espesor parcial, laceraciones y abrasiones.

Composición

- 2 capas no tejidas de alginato de calcio y sodio 90% - 92,5% y 1 capa central de poliéster 7,5% - 10%.
- Peso base: 140 - 200 gr/m².



Cutimed® Alginate

Apósito de alginato de calcio/sodio.

País de Procedencia	Planta Fabricante	Fabricante Legal	Certificaciones de calidad
China	Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. China	BSN Medical GMBH, Alemania	ISO 13485 / CE

Presentaciones Cutimed® Alginate

Código	Descripción	Unidad de Venta
72634-00008	Apósito 5cm x 5 cm	Caja x 10 Unidades
72634-00009	Apósito 10cm x 10 cm	Caja x 10 Unidades
72634-00010	Apósito 10cm x 20 cm	Caja x 10 Unidades
72634-00011	Mecha 2.5cm x 30 cm	Caja x 5 Unidades